

Kristal Viyole boyama kiti

İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

KULLANIM AMACI : Vücut dışı tıbbî teşhis

AÇIKLAMA :

Amiloidin metakromatik olarak boyanması için Kristal Menekşe kullanımı Bu boyamada suya bağımlı bir boya kullanılır. Mavi arka planlı kırmızımsı amiloid veren metakromatik boyama reaksiyonu. Su bazlı montaj Kırmızı amiloid renginin kalıcılığını korumak için ortam gereklidir.

ÖRNEK TOPLAMA :

Tüm standart tamponlu formalin fiksatifleri kabul edilebilir. Her türlü bölüm kabul edilebilir.

REAKTİFLER : **150 TEST**
Kristal Viyole 1x 50ml

** TEST sayısı slayt başına 330 mikrolitreye göre hesaplanmıştır.*

KATALOG NO : **PLKit23-150**

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ürün steril değildir.

PROTOKOL SÜRESİ : Ortalama 5-10 dakika

- PROTOKOL :**
1. Gerekirse dokuyu pararafinden arındırın ve suya hidratlayın.
 2. Kristal Viyole 5 dakika boyunca uygulayın.
 3. Lam üzerindeki fazla boyayı distile suyla durulayın.
 4. Su bazlı kapama maddesi ile kapatın.

SONUÇLAR :

Amiloid :	Kırmızımsı Menekşe
Arka plan :	Mavi Menekşe

SAKLAMA VE STABİLİTE : Bu ürün Oda sıcaklığında saklandığında 36 ay stabildir.

SORUN GİDERME : Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin