

PBS (25X)

KULLANIM AMACI:

In Vitro Diagnostik kullanım için

<u>Katalog No</u>	<u>Hacim</u>
PL-125-PB	125 ml
PL-500-PB	500 ml
PL-1000-PB	1000 ml

TANIMI

PBS, immün-işaretleme prosedürü esnasında yıkama bufferi olarak kullanılabilen 25X konsantre şekilde formüle edilmiştir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

MSDS'i inceleyin.

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Oda sıcaklığında saklandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

MİKROBİYOLOJİK DURUM

Ürün(ler) steril değildir.

ÖRNEĞİN VE REAKTİFLERİN HAZIRLANIŞI

Prosedüre bakınız.

PROSEDÜR

25X konsantre halde PBS hazırlamak için 25X konsantre solüsyonu distile su ile karıştırılmalıdır.

- 40 ml PBS için 960 ml distile su kullanılmalıdır.
- İyice karıştırın.

Hazırlanan 1X solüsyonun ph değeri 7.6 ± 0.2 olacaktır.

- Solüsyonun ph değerinde ayarlamalar yapmak gerekebilir.
- Ph değerini düşürmek için 1N HCl, Ph değerini artırmak için ise 1N NaOH kullanın.

Hazırlanmış olan 1X PBS solüsyon 1 hafta içinde kullanılmalıdır. Eğer solüsyon bulutlanırsa, atın ve yenisini hazırlayın.

Sorun Giderme

E-posta (patolab@patolab.com.tr) yoluyla PatoLab Teknik Destek bölümü ile temasa geçiniz.