

**KULLANIM AMACI :** Vücut dışı tıbbî teşhis

Bu ürün Patoloji ve Histoloji laboratuvarlarında, makroskopi aşamasında doku cerrahi sınırlarını işaretlemek için kullanılır.

#### AÇIKLAMA :

PatoMark, patoloji laboratuvarında dokuları kalıcı olarak işaretlemek için kullanılır. Patomark boyaları doğası gereği opaktır ve doku yüzeylerine çok etkili bir şekilde yapışır. Renkler, rutin histolojik boyalarla karıştırılmaması için seçilmiştir. Doku yüzeyine görünür bir şekilde nüfuz eder. Boyayı dokuya sabitlemek için Aseton veya Sirke kullanılabilir.

**KATALOG NO :** PatoMark-5

**BOYANMASI GEREKEN ALAN :** Doku sınırları

**AMBALAJ :** 5 x 50ml

**RENKLER :** Siyah , Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı

**MİKROBİYOLOJİK DURUM :** Bu ürün steril değildir.

#### BOYAMA İPUÇLARI :

Geleneksel yöntem PatoMark boyasını taze dokuya direk uygulamaktır fakat formalinde fikslenmiş olmalıdır.

- Dokuları kurulayın.
- Doku üzerinde gerekli alana az miktarda boya uygulayın.
- Boya, kurumaya bırakılırsa 1-2 dakika içinde doku yüzeyine bağlanacaktır.
- Boyayı sabitlemek için dokunun üzerine Aseton veya Elma sirkesi spreyleyin.
- Dehidrasyonu önlemek için kullandıktan sonra şişeleri tekrar kapatın.

**SAKLAMA VE STABİLİTE :** Bu ürün 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir.  
Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

**SORUN GİDERME :** Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin