

## TBS TWEEN 20 (20X)

### KULLANIM AMACI:

In Vitro Diagnostik kullanım için

<u>Katalog No</u>	<u>Hacim</u>
PL-125-TT	125 ml
PL-500-TT	500 ml
PL-1000-TT	1000 ml

### TANIMI

Tris Buffered Saline and Tween 20, immün işaretleme tekniklerinde kullanılan 20x bir yıkama solüsyonudur. Daha etkili yıkamalar gerçekleştirmek için Tween 20 eklenmiştir, bu sayede non-spesifik zemin boyanması azaltılır. Tween 20 ayrıca otomatik boyama yöntemlerinde reaktifin yayılmasını da artırır.

### UYARILAR VE ÖNLEMLER

MSDS'i inceleyin.

### SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

TBS Tween 20 'i oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Üretim tarihinden itibaren 24 ay miadlıdır.

### MİKROBİYOLOJİK DURUM

Ürün(ler) steril değildir.

### ÖRNEĞİN VE REAKTİFLERİN HAZIRLANIŞI

Prosedüre bakınız.

### PROSEDÜR

20X konsantre halde TBS Tween hazırlamak için 20X konsantre solüsyonu distile su ile karıştırılmalıdır.

- 50 ml TBS Tween 20 için 950 ml distile su kullanılmalıdır.
- İyice karıştırın.

Hazırlanan 1X solüsyonun ph değeri  $7.6 \pm 0.2$  olacaktır.

- Solüsyonun ph değerinde ayarlamalar yapmak gerekebilir.
- Ph değerini düşürmek için 1N HCl, Ph değerini artırmak için ise 1N NaOH kullanın.

Hazırlanmış olan 1X TBS Tween solüsyon 1 hafta içinde kullanılmalıdır. Eğer solüsyon bulutlanırsa, atın ve yenisini hazırlayın.

### Sorun Giderme

E-posta ([patolab@patolab.com.tr](mailto:patolab@patolab.com.tr)) yoluyla PatoLab Teknik Destek bölümü ile temasa geçiniz.