

Toludin Mavisi boyama kiti

İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

KULLANIM AMACI : Vücut dışı tıbbî teşhis

AÇIKLAMA :

Mide dokusu kesitlerinde Helicobacter pylori ve epitelyal münlerin boyanmasına yönelik kombine yöntem.

ÖRNEK TOPLAMA :

Tüm standart tamponlu formalin fiksatifleri kabul edilebilir. Her türlü bölüm kabul edilebilir.

REAKTİFLER : **150 TEST**
Toludin Mavisi 1x 50ml

KATALOG NO : *** TEST sayısı slayt başına 330 mikrolitreye göre hesaplanmıştır.**
PLKit609-150

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ürün steril değildir.

PROTOKOL SÜRESİ : Ortalama 30 dakika

- PROTOKOL :**
1. Kullanmadan önce filtre ediniz.
 2. Deparafinizasyondan sonra kesitleri dereceli alkol serisine koyun. Kesitleri suya alın.
 3. Kesitleri 30 dakika boyunca şaleye koyun.
Not : Boyama soluk ise, 1 saat boyunca toludin mavisi ile boyayın.
 4. Hızlıca akan suda mavileştirin.
 5. Alkollerden geçirerek, ksilen sonrası kapama yapınız.

SONUÇLAR :

Helikobakter pilori :	Mavi
Zemin :	Mavi
Musin :	Sarı

SAKLAMA VE STABİLİTE : Bu ürün Oda sıcaklığında saklandığında 36 ay stabildir.

SORUN GİDERME : Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin