

FITC KAPAMA MADDESİ

KULLANIM AMACI:

In Vitro Diagnostik kullanım için

Katalog No

Hacim

PL-060-FM
PL-125-FM

60 ml
125 ml

TANIMI

Kesit üzerinde lameli sabitler, FITC yoğunluğunu artırır ve solmayı önemli ölçüde azaltır

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Kullanım için flakonu açmadan önce reaktif oda sıcaklığında olmalıdır. **DONDURMAYIN.**
BU ÜRÜN İÇİN MSDS GEREKLİ DEĞİLDİR. Bu üründe toksik nitelikteki tek kimyasal sodyum azittir.
%0.1'in altında bir konsantrasyonda bulunur.

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Oda sıcaklığında saklandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

MİKROBİYOLOJİK DURUM

Ürün(ler) steril değildir.

GEREKLİ DİĞER MADDELER

Yok.

ÖRNEĞİN VE REAKTİFLERİN HAZIRLANIŞI

Prosedüre bakınız.

PROSEDÜR

FLORESAN MİKROSKOPİDE KULLANIM İÇİN

İmmün boyama tamamlandıktan sonra, Lamı sudan çıkarın, kesit üzerine FITC Kapama maddesi damlatın ve lameli kapatın. Lamel oda sıcaklığında 30 dakika içinde yapışmalıdır. Lamel kapama esnasında hava kabarcığı oluşmasını önlemek için **ŞİŞEYİ ÇALKALAMAYIN.** Hava kabarcıkları belirgin ise, parmak izi kalmaması için lamelin üzerine tırnağınız ile bastırabilirsiniz. Bu yönergeler tavsiye niteliğindedir; ancak laboratuvar içinde oluşturulan prosedürlere göre değiştirilebilirler.

Sorun Giderme

E-posta (patolab@patolab.com.tr) yoluyla PatoLab Teknik Destek bölümü ile temasa geçiniz.