

## HBVsAg

## İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

**KULLANIM AMACI :** Vücut dışı tıbbi teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır. Tavşan Monoklonal.

**AÇIKLAMA :** Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), hepatit B virüsünün yüzeyinde bulunan bir glikoproteindir. Sonrasında hepatit B enfeksiyonu, HBsAg ilk viral belirteç olarak karşımıza çıkar. HBsAg kanda, tükürükte, anne sütünde, Enfeksiyondan 2 ila 6 ay sonra hastaların ter, gözyaşı, nazofaringeal sekresyonlar, semen ve vajinal sekresyonları HBV ile. HBsAg antikorları esas olarak hepatit B virüsünün teşhisinde kullanılır.

<b>KATALOG NO :</b>	PL314	PL314-R7	7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
		PL314-R1	1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
<b>BOYANMASI GEREKEN ALAN :</b>	Sitoplazmik	PL314-1	1 ML KONS. 1/100 1000 TEST
		PL314-0,1	0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST

**POZİTİF KONTROL :** Hepatit B virüsü ile enfekte karaciğer

**AMBALAJ :** 7 ml Kullanıma Hazır ( 0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor. )

**KAYNAK :** Fare

**KLON :** ZR393

**ANTİKOR KONSANTRASYONU :** Bilinmiyor

**TÜR REAKTİVİTESİ :** İnsan. Diğerleri test edilmedi.

**EPİTOP :** Belirlenmedi

**MİKROBİYOLOJİK DURUM :** Bu ürün steril değildir.

**ÖN İŞLEM :** Formalinle sabitlenmiş doku bölümlerinin boyanması, doku bölümlerinin kaynayan 10 mM Citrate, pH 6.0, içinde 10-20 dk muamele edilmesini ve ardından oda sıcaklığında 20 dakika soğutulmasını gerektirir.

**PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ :** Oda ısısında 60 dakika

**BOYAMA İPUÇLARI :** Boyanma çok açıksa, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın. Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

**SAKLAMA VE STABİLİTE :** Bu ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

**SORUN GİDERME :** Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin