

Keratin 5 / 6

İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

KULLANIM AMACI : Vücut dışı tıbbî teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır.

AÇIKLAMA :

Yirmi insan keratini, asidik (pI <5.7) ve bazik (pI >6.0) alt ailelere ayrılır. Asidik ve bazik alt familyaların üyeleri çiftler halinde bir arada bulunur. Keratin çiftlerinin bileşimi, epitel hücre tipi, farklılaşma aşaması, hücresel büyüme ortamı ve hastalık durumuna göre değişir. Birçok çalışma, keratinlerin kanser araştırmalarında ve tümör tanımlamasında belirteçler olarak yararlılığını göstermiştir.

KATALOG NO :	PL1814	PL1814-R7	7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
		PL1814-R1	1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
		PL1814-1	1 ML KONS. 1/100 1000 TEST
BOYANMASI GEREKEN ALAN :	Sitoplazmik	PL1814-0,1	0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST

POZİTİF KONTROL : Mezotelyoma, Sukuamöz Hücreli Ca

AMBALAJ : 7 ml Kullanıma Hazır (0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor.)

KAYNAK : Fare

KLON : D5/16B4

ANTİKOR KONSANTRASYONU : Bilinmiyor

TÜR REAKTİVİTESİ : İnsan. Diğerleri test edilmedi.

EPİTOP : Belirlenmedi

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ürün steril değildir.

ÖN İŞLEM : Formalinle sabitlenmiş doku bölümlerinin boyanması, doku bölümlerinin kaynayan 1 mM EDTA, pH 8.0, içinde 10-20 dK muamele edilmesini ve ardından oda sıcaklığında 20 dakika soğutulmasını gerektirir.

PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ : Oda ısısında 60 dakika

BOYAMA İPUÇLARI : Boyanma çok açıksa, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın. Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemleri kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

SAKLAMA VE STABİLİTE : Bu ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

SORUN GİDERME : Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin