

## Vimentin

### İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

**KULLANIM AMACI :** Vücut dışı tıbbi teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır.

#### AÇIKLAMA :

Vimentin, mezenkimal hücrelerdeki ana ara filament proteinidir ve bu nedenle, farklılaşmamış neoplazmaların ayırıcı tanısında değerlidir.

|                                 |             |            |                              |
|---------------------------------|-------------|------------|------------------------------|
| <b>KATALOG NO :</b>             | PL9120      | PL9120-R7  | 7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST |
|                                 |             | PL9120-R1  | 1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST |
| <b>BOYANMASI GEREKEN ALAN :</b> | Sitoplazmik | PL9120-1   | 1 ML KONS. 1/500 5000 TEST   |
|                                 |             | PL9120-0,1 | 0,1 ML KONS. 1/500 500 TEST  |

**POZİTİF KONTROL :** Sarkom ve melanom

**AMBALAJ :** 7 ml Kullanıma Hazır ( 0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor. )

**KAYNAK :** Tavşan

**KLON :** SP20

**ANTİKOR KONSANTRASYONU :** Bilinmiyor

**TÜR REAKTİVİTESİ :** İnsan. Diğerleri test edilmedi.

**EPİTOP :** Belirlenmemiş

**MİKROBİYOLOJİK DURUM :** Bu ürün steril değildir.

**ÖN İŞLEM :** Formalinle sabitlenmiş dokuların immüno-histokimyası için özel bir ön işleme gerek yoktur.

**PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ :** Oda ısısında 30 dakika

**BOYAMA İPUÇLARI :** Boyanma çok açıkça, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın.  
Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

**SAKLAMA VE STABİLİTE :** Bu ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

**SORUN GİDERME :** Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin