

## Desmin

İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

**KULLANIM AMACI :** Vücut dışı tıbbî teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır.

**AÇIKLAMA :** Desmin, hem düz hem de çizgili kasların ara filament proteinidir. Desmine karşı antikor, çizgili (iskelet ve kalp) yanı sıra düz kas hücreleri ile reaksiyona girer. İskelet ve kalp kaslarında, boyama, karakteristik çizgili bir görünüm veren Z-bantlarıyla sınırlıdır. Anti-desmin antikoru, miyojenik kökenli tümörlerin tanımlanmasında faydalıdır. Leiomyosarkomlar (düz) ve rabdomyosarkomlar (çizgili) ile reaksiyona girer.

<b>KATALOG NO :</b>	PL376	PL376-R7	7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
		PL376-R1	1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
<b>BOYANMASI GEREKEN ALAN :</b>	Sitoplazma	PL376-1	1 ML KONS. 1/200 2000 TEST
		PL376-0,1	0,1 ML KONS. 1/200 200 TEST

**POZİTİF KONTROL :** Kas veya Sarkom

**AMBALAJ :** 7 ml Kullanıma Hazır ( 0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor. )

**KAYNAK :** Fare

**KLON :** D33

**ANTİKOR KONSANTRASYONU :** Bilinmiyor

**TÜR REAKTİVİTESİ :** İnsan, Babun, Maymun, İnek, Kedi, Köpek, Hamster, Sıçan, Tavuk. Diğerleri-bilinmiyor.

**EPİTOP :** Belirlenmedi

**MİKROBİYOLOJİK DURUM :** Bu ürün steril değildir.

**ÖN İŞLEM :** Formalinle sabitlenmiş dokuların immünohistokimyası için özel bir ön işleme gerek yoktur.

**PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ :** Oda ısısında 30 dakika

**BOYAMA İPUÇLARI :** Boyanma çok açıksa, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın. Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

**SAKLAMA VE STABİLİTE :** Bu ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

**SORUN GİDERME :** Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin