

PatoDiff Quick boya kiti

İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

Bu üçlü boyama paketi hematolojik ve sitolojik yaymaların hızlı diferansiyel değerlendirmesi içindir ve DIFF-QUICK ile doğrudan karşılaştırılabilir.

KULLANIM AMACI : Vücut dışı tıbbî teşhis

AÇIKLAMA :

Bu üçlü boyama paketi hematolojik ve sitolojik yaymaların hızlı diferansiyel değerlendirmesi içindir.

ÖRNEK TOPLAMA :

Taze, pıhtılaşmamış venöz veya arteriyel kan kullanılmalıdır. Sitoloji örnekleri her zamanki yöntemle hazırlanır.

REAKTİFLER :	150 TEST	1000 TEST	2000 TEST
Solüsyon A	1x 50ml	1x 500ml	1x 1000ml
Solüsyon B	1x 50ml	1x 500ml	1x 1000ml
Solüsyon C	1x 50ml	1x 500ml	1x 1000ml

* TEST sayısı slayt başına 330 mikrolitreye göre hesaplanmıştır.

KATALOG NO :	PLKit1-150	PLKit1-1000	PLKit1-2000
--------------	------------	-------------	-------------

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ürün steril değildir.

BOYANMASI GEREKEN ALAN : Doku sınırları

PROTOKOL SÜRESİ : Tahminen 1 dakika

PROTOKOL :

- Slaytlar üzerinde ince kan yaymaları hazırlayın ve havayla kurutun.
- 10 saniye boyunca Solüsyon A'ya daldırıp çıkartın.
- 10 saniye boyunca Solüsyon B'ye daldırıp çıkartın.
- 10 saniye boyunca Solüsyon C'ye daldırıp çıkartın.
- Slaytı tamponlu suda (pH 6,8) 10 saniye batırıp çıkartın.

SONUÇLAR :

Çekirdekler:	Kırmızı/morun çeşitli tonları
Eozinofil granülleri:	Parlak turuncu
Kırmızı kan hücreleri:	Pembe-turuncu
Nötrofillerdeki Granüller:	Kırmızı mor
Bazofil granülleri:	Mavi siyah
Sitoplazma -Lenfositler/Monositler:	Soluk mavi

SAKLAMA VE STABİLİTE : Bu ürün Oda sıcaklığında saklandığında 36 ay stabildir.

SORUN GİDERME : Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin