

## Kas Spesifik Aktin

İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

**KULLANIM AMACI :** Vücut dışı tıbbî teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır.

### AÇIKLAMA :

Antikor, rahim, ileum, aort, diyafram, kalp ve düz kas hücrelerinin doku ekstraktlarından elde edilen aktin ile reaksiyona girer. İskelet, kalp ve düz kaslardan gelen alfa aktin'i ve düz kas kaynaklarından gama aktin'i tanıır.

<b>KATALOG NO :</b>	PL742	PL742-R7	7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
		PL742-R1	1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
<b>BOYANMASI GEREKEN ALAN :</b>	Sitoplazmik	PL742-1	1 ML KONS. 1/100 1000 TEST
		PL742-0,1	0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST

**POZİTİF KONTROL :** Kas

**AMBALAJ :** 7 ml Kullanıma Hazır ( 0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor. )

**KAYNAK :** Fare

**KLON :** HHF35

**ANTİKOR KONSANTRASYONU :** Belirlenmemiş

**TÜR REAKTİVİTESİ :** İnsan, diğerleri bilinmiyor

**EPİTOP :** Bilinmiyor

**MİKROBİYOLOJİK DURUM :** Bu ürün steril değildir.

**ÖN İŞLEM :** Formalinde fikse edilmiş immünohistokimya dokuları için, Özel bir ön işlem gerektirmez

**PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ :** Oda ısısında 30 dakika

**BOYAMA İPUÇLARI :** Boyanma çok açıksa, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın.  
Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

**SAKLAMA VE STABİLİTE :** Bu ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

**SORUN GİDERME :** Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin