

MAYER HEMATOKSİLEN

KULLANIM AMACI:

In Vitro Diagnostik kullanım için

<u>Katalog No</u>	<u>Hacim</u>
PL-125-MH	125 ml
PL-1000-MH	1000 ml

TANIMI

Mayer's Hematoxylin, histolojik uygulamalarda kullanılan bir boyadır. Bu formül, ilk kez Mayer tarafından geliştirilen formüle dayanır ve biraz daha uzun uygulama süresi gerektirir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

MSDS'i inceleyin.

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Oda sıcaklığında saklandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

MİKROBİYOLOJİK DURUM

Ürün(ler) steril değildir.

GEREKLİ DİĞER MADDELER

Yok.

ÖRNEĞİN VE REAKTİFLERİN HAZIRLANIŞI

Prosedüre bakınız.

PROSEDÜR

- Gerekliyse dokuyu rehidre ediniz.
- Hematoksilen ile hücreleri 1-2 dakika boyayınız.
- Boya mavileşene kadar Bluing Reagent içine yerleştiriniz.
- Distile su ile yıkayınız.
- Preparatı yapınız.

Sorun Giderme

E-posta (patolab@patolab.com.tr) yoluyla PatoLab Teknik Destek bölümü ile temasa geçiniz.