

## Keratin 7

İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

**KULLANIM AMACI :** Vücut dışı tıbbî teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır.

**AÇIKLAMA :** Keratin 7, çoğu glandüler ve geçiş epitelinde bulunan ancak tabakalı skuamöz epitelde bulunmayan temel bir sitokeratindir. Keratin 7, yumurtalık, akciğer ve memenin epitel hücrelerinde eksprese edilir, ancak kolon, prostat veya gastrointestinal sistem değil. Sitokeratin antikorunu, yumurtalık karsinomlarını (keratin 7+) kolon karsinomlarından (keratin 7-) ayırt etmede faydalıdır.

**KATALOG NO :** PL1352  
PL1352-R7 7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST  
PL1352-R1 1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST  
**BOYANMASI GEREKEN ALAN :** Sitoplazma  
PL1352-1 1 ML KONS. 1/100 1000 TEST  
PL1352-0,1 0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST

**POZİTİF KONTROL :** Yumurtalık, Meme Karsinomu

**AMBALAJ :** 7 ml Kullanıma Hazır ( 0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor. )

**KAYNAK :** Fare

**KLON :** OV-TL 12/30

**ANTİKOR KONSANTRASYONU :** 200ug/ml

**TÜR REAKTİVİTESİ :** İnsan. Sıçan ile reaksiyona girmez. Diğerleri-bilinmiyor

**EPİTOP :** Belirlenmedi

**MİKROBİYOLOJİK DURUM :** Bu ürün steril değildir.

**ÖN İŞLEM :** Formalinle sabitlenmiş doku bölümlerinin boyanması, doku bölümlerinin kaynayan 10 mM Citrate, pH 6.0, içinde 10-20 dk muamele edilmesini ve ardından oda sıcaklığında 20 dakika soğutulmasını gerektirir.

**PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ :** Oda ısısında 30 dakika

**BOYAMA İPUÇLARI :** Boyanma çok açıksa, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın.  
Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

**SAKLAMA VE STABİLİTE :** Bu ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

**SORUN GİDERME :** Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin

