

RCC

İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

KULLANIM AMACI : Vücut dışı tıbbi teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır.

AÇIKLAMA : Renal Hücreli Karsinom antikor, proksimal renal tübülün fırça sınırında lokalize olan 200 kDa'lık bir glikoproteini tanıır. Bu antikor, Primer Renal Hücreli Karsinomların yaklaşık %90'ı ve Metastatik Renal Hücreli Karsinomların yaklaşık %85'i ile immün reaksiyona girer. Bu antikorla reaksiyona girebilecek diğer tümörler Nadir görülen bir Meme Kanseri olan Paratiroid Adenomu. Nefroblastoma, Onkositoma, Mezoblastik Nefroma, Geçiş Hücreli Karsinom ve Anjiyomiyolipom bu antikorla işaretlenmemiştir.

KATALOG NO :	PL409	PL409-R7	7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
		PL409-R1	1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
BOYANMASI GEREKEN ALAN :	Sitoplazmik, Membranöz	PL409-1	1 ML KONS. 1/100 1000 TEST
		PL409-0,1	0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST

POZİTİF KONTROL : Böbrek, Meme, Tiroid, Renal Hücreli Karsinom

AMBALAJ : 7 ml Kullanıma Hazır (0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein, 0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor.)

KAYNAK : Fare

KLON : PN-15

ANTİKOR KONSANTRASYONU : 200ug/ml

TÜR REAKTİVİTESİ : İnsan. Diğerleri test edilmedi.

EPİTOP : Belirlenmedi

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ürün steril değildir.

ÖN İŞLEM : Formalinle sabitlenmiş doku kesitlerinin boyanması, doku kesitlerinin kaynayan 10 mM sitrat tamponu, pH 6.0 içinde 10-20 dakika muamele edilmesini ve oda sıcaklığında 20 dk. soğutulmasını gerektirir.

PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ : Oda ısısında 30 dakika

BOYAMA İPUÇLARI : Boyanma çok açıksa, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın.
Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

SAKLAMA VE STABİLİTE : Bu ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

SORUN GİDERME : Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin