

E-Cadherin

İN VİTRO DİYAGNOSTİK PROSPEKTÜS

KULLANIM AMACI : Vücut dışı tıbbi teşhis

Bu ürün Normal ve neoplastik formalinle sabitlenmiş, parafine gömülmüş doku kesitleri ile ışık mikroskobu ile görüntülenecek kalitatif immünohistokimya için tasarlanmıştır. Tavşan Monoklonaldır.

AÇIKLAMA : E-cadherin (uvomorulin, cell-CAM120/80), kalsiyuma bağımlı bir hücre adezyon molekülüdür ağırlıklı olarak epitel dokularında eksprese edilir. Büyümede önemli bir rol oynar ve doku mimarisinin kontrol mekanizmaları ve bakım yoluyla hücrelerin gelişimi doku bütünlüğü. Çok sayıda çalışma, Ecadherin'in azaldığını ve/veya kaybolduğunu göstermiştir. karsinomlardaki ekspresyon, bu tümörlerin potansiyeli ile pozitif olarak ilişkilidir. invazyon ve metastaz. E-cadherin, belirsiz durumlarda LCIS'i DCIS ve ILC'i IDC den ayırmada kullanılır.

KATALOG NO :	PL2100	PL2100-R7	7 ML KULLANIMA HAZIR 70 TEST
		PL2100-R1	1 ML KULLANIMA HAZIR 10 TEST
BOYANMASI GEREKEN ALAN :	Hücre zarı	PL2100-1	1 ML KONS. 1/100 1000 TEST
		PL2100-0,1	0,1 ML KONS. 1/100 100 TEST

POZİTİF KONTROL : Deri. Akciğer CA

AMBALAJ : 7 ml Kullanıma Hazır (0.05mol/L Tris-HCl, pH 7.6'da stabilize protein,0.015mol/L sodyum azid içeren seyreltilmiş 7 ml antikor.)

KAYNAK : Tavşan

KLON : ZR375

ANTİKOR KONSANTRASYONU : Bilinmiyor

TÜR REAKTİVİTESİ : İnsan. Diğerleri test edilmedi.

EPİTOP : Belirlenmedi

MİKROBİYOLOJİK DURUM : Bu ürün steril değildir.

ÖN İŞLEM : Formalinle sabitlenmiş doku kesitlerinin boyanması, doku kesitlerinin kaynayan 10 mM sitrat tamponu, pH 6.0 içinde 10-20 dakika muamele edilmesini ve oda sıcaklığında 20 dk. soğutulmasını gerektirir.

PRİMER ANTİKOR İNKÜBASYON SÜRESİ : Oda ısısında 60 dakika

BOYAMA İPUÇLARI : Boyanma çok açıksa, daha düşük seyreltme veya daha uzun süre kullanın.
Eğer boyanma çok güçlüyse, ön işlemi kontrol edin, daha yüksek seyreltme veya daha kısa süre kullanın.

SAKLAMA VE STABİLİTE : Bu ürün sodyum azid içerir ve 2-8°C'de saklandığında 24 ay stabildir. Ürün etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Reaktif önerildiği şekilde saklanmazsa, performans kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.

SORUN GİDERME : Lütfen e-posta ile Patolab Teknik Destek ile iletişime geçin